

10%, 16% y 22% peróxido de carbamida
sistema avanzado de blanqueamiento dental

NORBLANC HOME es un gel de blanqueamiento dental, con alta viscosidad y pH neutro para usar en el hogar. Es un gel cristalino de agradable sabor y liberación mantenida, la combinación exclusiva de acondicionadores, calmantes junto a su alto contenido de agua ayudan a reducir la sensibilidad.

COMPOSICION:

10.0-22.0% peso Peróxido de carbamida
<40% peso Aditivos
30% peso Glicerol
20% peso Agua
0.1% peso Aromas

OPCIONES DE TRATAMIENTO:

Norblanc Home

10%: 6-8 horas por la noche

16%: a) 2x40 minutos/día

b) 1x90 minutos/día

22%: 1x 40 minutos/día

Tome nota, los pacientes con sensibilidad necesitarán un día o dos de descanso entre tratamientos. También se sugiere tiempo de tratamiento más corto.

INSTRUCCIONES:

Cepille y utilice seda dental en sus dientes. Tome una jeringa del kit. Quite la tapa e inserte un tip de aplicación girándolo para asegurarlo dentro de la jeringa.

- 1) Coloque una pequeña gota de gel dentro de cada compartimento de la cubeta, para los dientes a tratar.
- 2) Asegúrese de ajustar la cubeta en boca.
- 3) Elimine los excesos de gel en su boca con los dedos, gasa o un cepillo suave y seco.

4) Después del tratamiento saque la cubeta de boca. Lave la cubeta y la boca con agua tibia para evitar sensibilidad.

5) Cepille sus dientes.

PRECAUCIONES:

Debe ser usado bajo la supervisión de un dentista. Use a temperatura ambiente.

No use después de la fecha de vencimiento.

NORBLANC HOME no debe ser usado en pacientes con alergias o sensibilidad química a peróxido, glicerol, etc. NORBLANC HOME puede irritar los ojos y la piel. Lave con agua si el contacto ocurre.

No fume durante o inmediatamente después del proceso de blanqueamiento dental.

Si usted siente cualquier sensibilidad o sensaciones inusuales, quítese la cubeta, enjuague su boca y cepille sus dientes. Suspenda el tratamiento y consulte a su dentista inmediatamente.

Cuando la jeringa se termine retire la punta de aplicación y coloque la tapa asegurándola firmemente, deséchela. En caso de una jeringa usada a medias, refrigérela. Si la punta de aplicación va a ser reutilizada lávela con agua caliente.

Después de remover la cubeta, enjuague la boca y cepille los dientes antes de comer o beber.

Comidas y bebidas que contengan colorantes fuertes deben ser evitados por 48 horas a lo menos. Se debe consumir con moderación durante el tratamiento café, bebidas o dulces coloreados.

Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas.

Nunca inyecte NORBLANC HOME en el cuerpo.

No debe ser usado en mujeres embarazadas, periodo de lactancia o en niños menores de 14 años.

Mantenga las jeringas sin usar refrigeradas.